



ON-SITE^{Alcohol}

Una prueba facil de usar, en dos minutos obtendra respuestas en cualquier lugar y a cualquier hora

Saber quien ha estado tomando en el trabajo, en la carretera, —en cualquier lugar la seguridad personal puede ser comprometida— es esencial. Pero obtener respuestas a sus preguntas al instante, cuando puede tomar medidas es una ventaja. Y eso es lo que On•Site Alcohol ofrece. Despues de dos minutos este examen portatil muestra un signo “+” morado cuando detecta alcohol ya sea en una muestra de saliva o de orina.

Con On•Site Alcohol, no hay necesidad de comprar o usar un analizador de aliento u otros equipos especiales y costosos. Solo abra el empaque y siga las instrucciones. No hay necesidad de invertir tiempo en entrenamiento o conocimiento especializado. Y, el uso de On•Site Alcohol esta aprobado por el U.S. National Highway Traffic Safety Administration, Department of Transportation, Highway and Safety Programs.

Resultados de pruebas rapidas que aseguran su mundo™



VARIAN

Respuestas rapidas en unos simples pasos



▶ Para abrir la prueba On•Site Alcohol solo es necesario retirar la cobertura de izquierda a derecha. Ubique la prueba de tal manera que la marquilla quede hacia usted. Escriba el nombre del donante y fecha.



▶ Usando la pequeña pipeta incluida en la prueba, pipetee una gota del lado izquierdo donde dice "Reagent". Sostener la pipeta con el reactivo verticalmente y aplicar una gota del reactivo al orificio designado con "Result."



▶ Utilize el isopo desechable incluido en la prueba para recolectar la muestra de saliva. O, utilice la larga pipeta desechable para recoger una gota de orina de un contenedor.



▶ Transfiera el isopo saturado o la muestra de orina al orificio de especimen que esta designado por "Sample" en la prueba.



▶ Espere dos minutos, luego lea sus resultados. Un signo "+" morado indica un resultado positivo (presencia de alcohol en una concentración aproximada de 0.02% p/v). La ausencia de este signo indica un resultado negativo.

Product Catalog

Part Number	Product	Package Quantity
OnTrak TesTcup®		
47518	OnTrak TesTcup: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	25
764817	OnTrak TesTcup 5: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), PCP	25
3016633	OnTrak TesTcup 501: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	25
1118501	OnTrak TesTcup 5 M2K: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), PCP	25
1986678	OnTrak TesTcup Pro5: Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	25
OnTrak TesTcup® II		
6902046	OnTrak TesTcup II M2K: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), PCP	25
6902047	OnTrak TesTcup II 5: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), PCP	25
6902048	OnTrak TesTcup II Pro5: Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	25
6902049	OnTrak TesTcup II 501: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	25
On•Site®		
6902039	On•Site CupKit™: Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	50
6902040	On•Site CupKit 501: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	50
6902042	On•Site CupKit 5 M2K: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), PCP	50
6902043	On•Site CupKit™ 5: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), PCP	50
6902044	On•Site CupKit™ Pro5: Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	50
6902004	On•Site OraLab®: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine (Opiates), Methamphetamine, PCP	25
47464	On•Site Alcohol (0.02%)	50
Adulteration test		
3111407	Intect™ 7 Test Strips: Creatinine, Nitrite, Gluteraldehyde, pH, PCC, Bleach, Specific Gravity	25
OnTrak TesTstik™		
766496	Amphetamines	50
766569	Barbiturates	50
766550	Benzodiazepines	50
766518	Cocaine	50
1986686	Methamphetamines	50
766534	Morphine 300 ng/mL (Opiates)	50
766542	PCP	50
766526	THC 50 ng/mL (Marijuana)	50
1118579	OnTrak TesTstik 2: Cocaine, THC	50
1118595	OnTrak TesTstik 3: Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	50
Ancillary products		
42212	Evidence Tape	100
42210	Disposable gloves	50 pairs
47123	Specimen containers	100



VARIAN

www.varian-onsite.com

1•800•737•9667

WCI-pdf-0066 5/04 U.S.A.