



OnTrak
TESTSTIK™

La prueba de
drogas de mayor
confiabilidad



OnTrak Teststik es un examen para indetificar el uso drogas que es facil de usar y que combina una incomparable confiabilidad en un avanzado y economico diseño. Gracias a la superior tecnologia de latex y su proceso de fabricacion patentado practimente elimina falsos positivos y entrega resultados tan precisos como el examen de laboratorio chromatografia de gases/espectrofotometria de masas (GC/MS). Los resultados de Teststik's son precisos, consistentes y confiables al nivel de ser utilizados en una corte. No hay necesidad de mezclar, contabilizar el tiempo, o entrenar de un operador especializado. Lo mejor de todo es que es economico. Esta disponible en configuraciones de una, dos o tres de las drogas mas abusadas hoy en dia, usted escoge la combinacion que mas se acerque a sus necesidades.

Resultados de pruebas rapidas que aseguran su mundo™



VARIAN

TesTstick ofrece respuestas precisas en cualquier momento.

Puede ser almacenado a temperatura ambiente por 24 meses a partir de la fecha de fabricacion.

Facil de usar, solo introduscalos y lea.


Cumple los estandares de U.S. Federal U.S. Federal Food y Drug Administration (FDA)

No hay necesidad de mezclar reactivo, manipular o usar pipeta.

Cumple legalmente con el nivel de corte de deteccion de SAMHSA .

Simultaneos tamizajes para las drogas de abuso mas usadas.


Facil de interpretar, el resultado aparece al lado del nombre de la droga en cuestion. Una banda azul indica un resultado negativo.

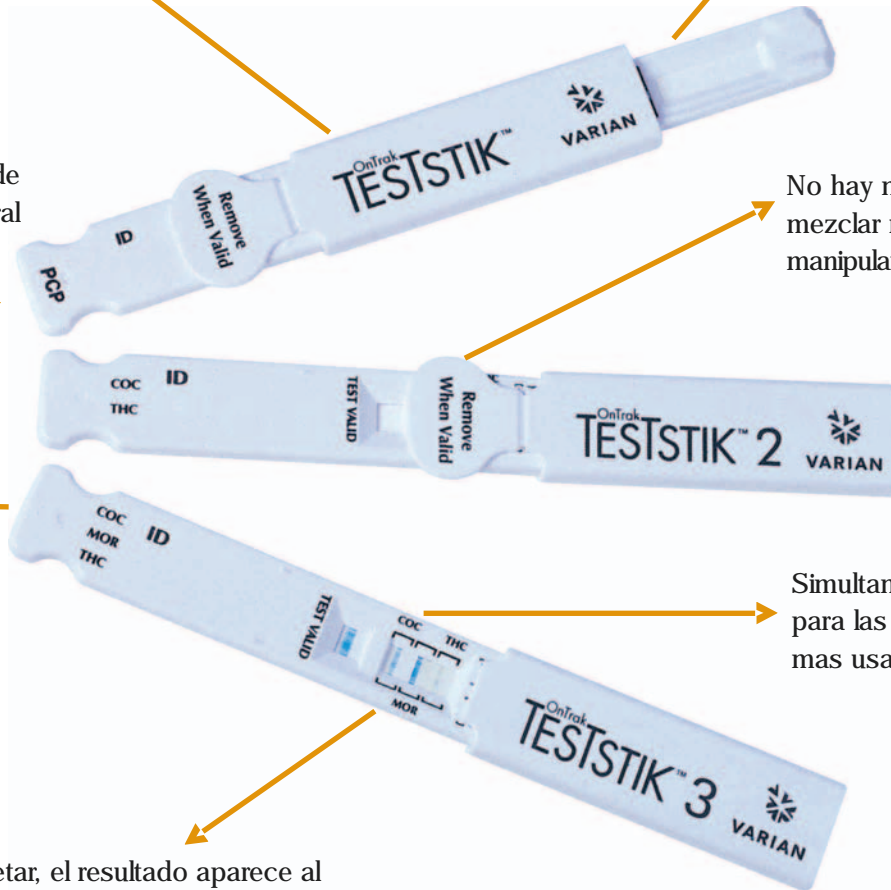

La tecnologia de Latex entrega un marco de record en desempeno

El proceso de fabricacion de Varian usa una tecnologia de latex que es mas flexible que la tradicional prueba de oro coloidal. No hay necesidad de de contabilizar el tiempo para obtener resultados. Cuando usted usa TesTstick, usted tiene resultados precisos y facil de analizar en cinco minutos. Y sus resultlados se mantienen precisos y legibles hasta por 30 minutos despues del examen.

La tecnologia de Latex permite un tiempo de lectura hasta de 30 minutos comparado al oro coloidal

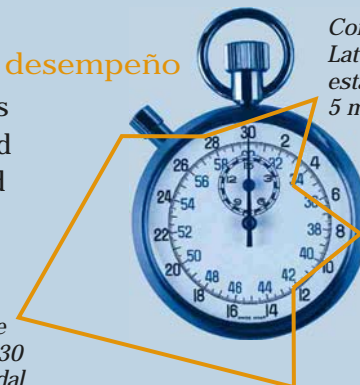

Con la tecnologia de Latex, los resultados estan disponibles en 5 minutos

Los productos con oro coloidal deben ser leidos dentro de 5 a 10 minutos, despues de este tiempo, la lectura puede ser falsa.

En unos simples pasos



- ▶ Abrir el empaque delicadamente para remover la prueba. Escriba el nombre del donante y la fecha de toma de la muestra en el área designada. Para exponer la almohadilla de la muestra remover la cobertura hacia arriba hasta la línea.



- ▶ Sumerja la almohadilla dentro del especimen hasta que este alcance la línea azul. Sostenga la prueba por 10 segundos.



- ▶ Saque la prueba y deslice la obertura hacia adelante para ocultar la almohadilla.



- ▶ Esperar hasta que una banda azul se forme en la ventana "Test Valid".

- ▶ Una vez la línea aparezca en "Test Valid", remover la lengüeta para exponer el resultado en la ventana.



Varian, Inc. es el mayor distribuidor de instrumentos científicos, diagnóstico, productos de laboratorio, tecnología de aspiradoras, y servicios electrónicos de producción. Hace ya 50 años Varian Associates, Inc., Varian, Inc. se volvieron independientes en 1999, combinando el espíritu innovativo de una nueva empresa con medio siglo de experiencia.

En la pasada década, Varian, Inc. le produjo a Roche Diagnostics más pruebas rápidas de drogas de abuso que todas las otras empresas manufactureras combinadas. Después de haber adquirido el negocio de Roche de pruebas de drogas de abuso, nuestra empresa ha emergido como experta en todas las fases de toxicología de pruebas de abuso en el lugar.

Product Catalog

Part Number	Product	Package Quantity
OnTrak TesTcup®		
47518	OnTrak TesTcup: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	25
764817	OnTrak TesTcup 5: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), PCP	25
3016633	OnTrak TesTcup 501: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	25
1118501	OnTrak TesTcup 5 M2K: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), PCP	25
1986678	OnTrak TesTcup Pro5: Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	25
OnTrak TesTcup® II		
6902046	OnTrak TesTcup II M2K: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), PCP	25
6902047	OnTrak TesTcup II 5: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), PCP	25
6902048	OnTrak TesTcup II Pro5: Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	25
6902049	OnTrak TesTcup II 501: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	25
On•Site®		
6902039	On•Site CupKit™: Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	50
6902040	On•Site CupKit 501: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), Methamphetamine	50
6902042	On•Site CupKit 5 M2K: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 2000 ng/mL (Opiates), PCP	50
6902043	On•Site CupKit™ 5: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates), PCP	50
6902044	On•Site CupKit™ Pro5: Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	50
6902004	On•Site OraLab®: Amphetamine, Cocaine, THC, Morphine (Opiates), Methamphetamine, PCP	25
47464	On•Site Alcohol (0.02%)	50
Adulteration test		
3111407	Intect™ 7 Test Strips: Creatinine, Nitrite, Gluteraldehyde, pH, PCC, Bleach, Specific Gravity	25
OnTrak TesTstik™		
766496	Amphetamines	50
766569	Barbiturates	50
766550	Benzodiazepines	50
766518	Cocaine	50
1986686	Methamphetamines	50
766534	Morphine 300 ng/mL (Opiates)	50
766542	PCP	50
766526	THC 50 ng/mL (Marijuana)	50
1118579	OnTrak TesTstik 2: Cocaine, THC	50
1118595	OnTrak TesTstik 3: Cocaine, THC, Morphine 300 ng/mL (Opiates)	50
Ancillary products		
42212	Evidence Tape	100
42210	Disposable gloves	50 pairs
47123	Specimen containers	100



VARIAN

www.varian-onsite.com

1•800•737•9667

WCI-pdf-0066 5/04 U.S.A.